



Epo Flier

CE

0123

REF A.4086

La procedura di Delorme Interna è una tecnica con controllo visivo utilizzata per intervenire sulla defecazione ostruita causata dall'intussuscezione rettale.

L'Epo Flier è un kit realizzato appositamente per l'esecuzione ottimale dell'intervento. È composto da tre pezzi: un anoscopio di 30mm di diametro con flangia munita di asole, un mandrino per l'introduzione e una valva finestrata, rotante ad ali di gabbiano. Con il paziente in posizione litotomica sottoposto ad anestesia epidurale, si inserisce l'anoscopio nell'ano, si sfilava il mandrino e si fissa la flangia al perineo mediante punti di sutura. Si esegue quindi un'infiltrazione con soluzione salina e adrenalina 1:200.000. Viene effettuata un'incisione circolare della mucosa 2 centimetri al di sopra della linea dentata e la mucosa è dissecata per 8-15 cm secondo l'entità dell'intussuscezione o del prolasso. Successivamente si effettua una plicatura della muscolatura circolare del retto suddividendo la circonferenza anale in quattro quadranti, iniziando la stessa nei punti cardinali (ore 3-6-9-12). La plicatura, in filo riassorbibile 2-0, include il margine distale della mucosa e prosegue verticalmente fino a raggiungere il margine prossimale della mucosa. Quindi si procede alla sezione del cilindro mucosottomucoso e ad annodare i primi quattro punti. La plicatura viene ripetuta negli spazi rimanenti (2 o 3 punti per ogni quadrante), consentendo di accorciare "a soffietto" la parete muscolare del retto, con la correzione dell'intussuscezione retto-ale. A volte necessitano alcuni ulteriori punti mucomucosi per il completamento della anastomosi.

La procedura può essere associata ad una plastica del muscolo elevatore in caso di rettocele di tipo II-III.