


## !!AVVERTENZE!!



- Al termine di ogni utilizzo, inserire 60/80 ml di aria nella sonda prima di riporla (vedi retro).
- Lavare la sonda solo con acqua e sapone neutro (Marsiglia).
- Non detergere la sonda con alcool, soluzioni alcoliche (tipo gel disinfettanti) e/o abrasive.
- Tenere la sonda lontano da fonti di calore anche durante il trasporto (no auto al sole, forno, acqua bollente).




**X**

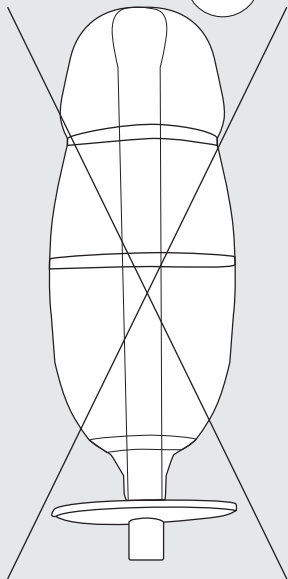


> 80 ml

**X**

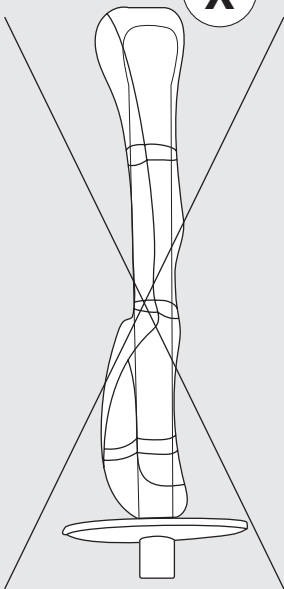

< 60 ml

**✓**

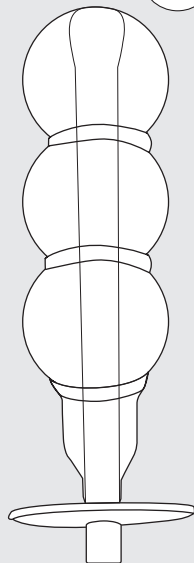

= 60/80 ml